

Аппарат для измерения стабильности имплантов

IS3™


- Больше возможностей для определения оптимального срока нагрузки имплантата
- Незаменим в сложных клинических случаях и при немедленной нагрузке
- Сокращает время лечения



HIOSSEN®
IMPLANT

Уверенность и предсказуемость результата лечения

- Точная диагностика повышает процент успешных операций по имплантации
- Уверенный выбор правильного срока подачи нагрузки на имплантат особенно важен при ранней или немедленной нагрузке и при лечении пациентов из группы риска.

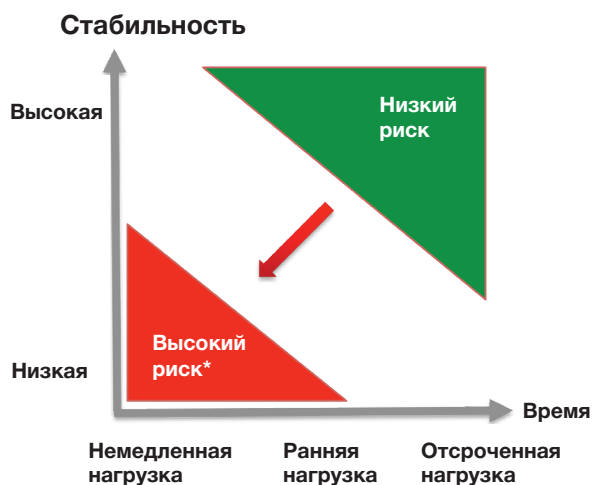


Процент успешных операций при немедленной нагрузке в группе **высокого риска***:

- Бруксизм 71.7%
- Диабет 71.4%
- Немедленная нагрузка 77.5%
- Блок подвздошной кости + НКР + синуслифтинг 50%
- Хирурги с опытом работы менее 5 лет имели в 5 раз больше неудачных операций


Высокая точность измерений

Минимальная дисперсия

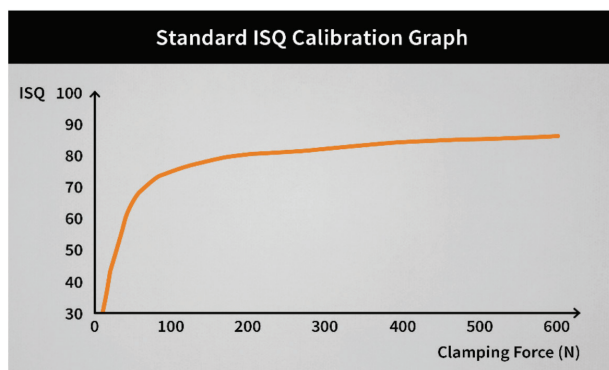

Стандартная калибровочная кривая ISQ*

Плотная фиксация штифта в имплантате

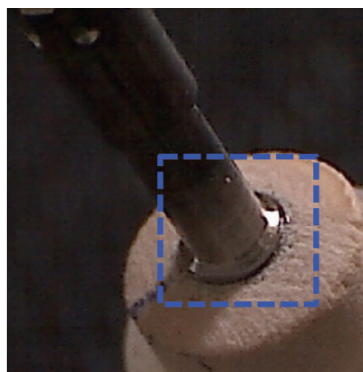

IS3 Штифт MulTipeg™ (#74)

Многоразовые штифты MulTipeg™

- Автоклавируемые, калиброванные, совместимые со всеми известными системами имплантатов штифты MulTipeg.
- Изготовлены из биосовместимого титана.
- Можно использовать до 20 раз без нарушения точности измерений.

Штифт MulTipeg™ (титан)



- Подходит для повторного использования
- Автоклавируемый
- Калиброванный


Ключ MulTipeg™ (сталь)



- Подходит для повторного использования
- Автоклавируемый
- Нержавеющая сталь

С заботой о ваших пациентах

- Точное определение оптимального срока нагрузки на имплантат
- Измерение по шкале ISQ (Коэффициент Стабильности Имплантата, КСИ) от 1 до 99 единиц.
- Чем выше стабильность имплантата, тем выше показатель ISQ, он соотносится с микроподвижностью имплантата.

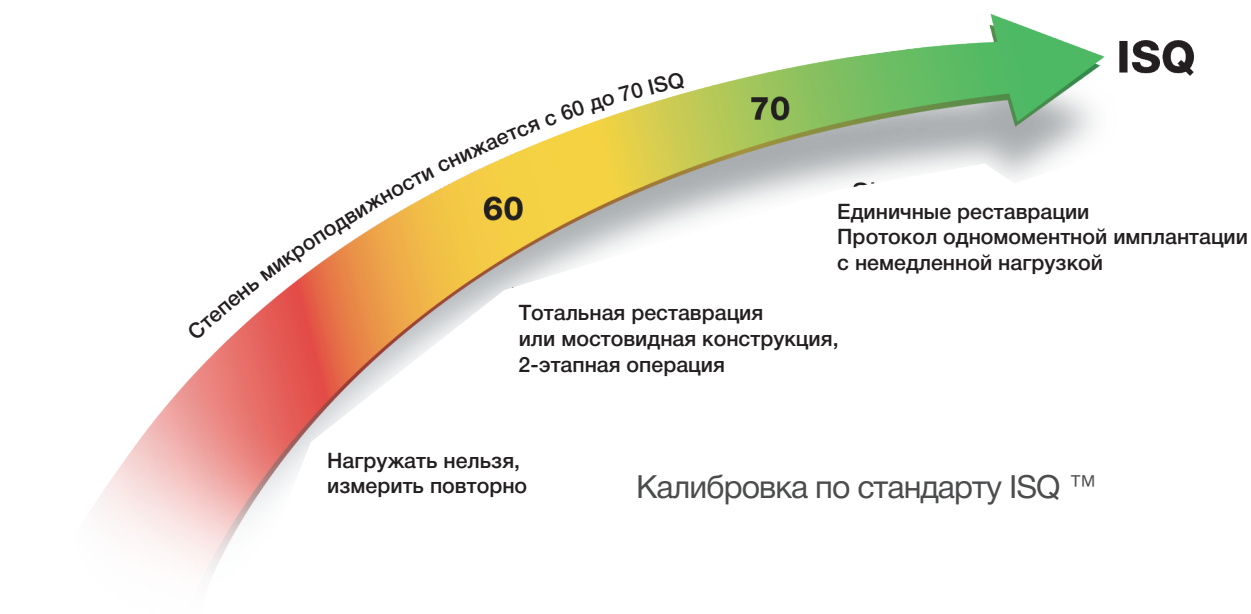

Простота использования

- Аппарат помещается в руке, функции активируются нажатием кнопки
- С обеих сторон расположены дисплеи, на которых высвечиваются цифры показателя ISQ.
- Аппарат работает от аккумуляторов, которые заряжаются от сети (зарядное устройство в комплекте).




Характеристика и протокол применения

Система IS3™ состоит непосредственно из аппарата для измерения показателей ISQ, зарядного устройства к нему и многоразовых штифтов MultiPreg™, которые вкручиваются в имплантат с помощью ключа MultiPreg™.



ЭТАП 1

Выбрать подходящий MultiPreg™ в зависимости от используемой системы и платформы имплантатов

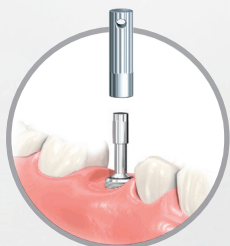

ЭТАП 2

Соединить MultiPreg™ с имплантатом с помощью ключа (вручную, с усилием 6-8 Нсм)



ЭТАП 3

Включить аппарат и направить его на штифт MultiPreg™



ЭТАП 4

Аппарат дважды издаст звуковой сигнал - при начале работы и еще один раз по завершении процесса измерения ISQ. Через секунду данные появятся на дисплее в числовом выражении.

Ассортимент компонентов MultiPreg™

A

ADIN
AIRES
Alpha-Bio
Anker
Ankylos
Anthogyr
Argon
Astra Tech
Avinent

B

BEGO
BioHorizons
Biomet/3i
Bionnovation
Biotech Dental
BluSkyBio
Bredent
BTI
BTK

C

Camlog
Conelog
C-Tech

D

Dentack
Dentegris
Dentium
DEVA
DIO

E

Fasy Implant
Edierre

G

Global D
GMI

H

Hahn
Hiossen Implant

I

IDI Evolution
Implance
Implant Direct
Implant Swiss
Implantvision
Intra-lock

J

J Dental Care

K

Keystone
Klockner
Konmet

L

Lasak
Leader

M

Medentika
Megagen
MIS

N

Neo Biotech
Neodent
Neoss
Nobel Biocare
NucleOss

O

OCO Biomedical
Osstem

P

Paltop
Phibo
Prodent Italia

R

Resista

S

Schutz Dental
SIC
Southern Implants
Spiral Tech
Straumann
Sweden & Martina

T

Tag Dental
Thommen
TRI Dental implants

X

Xive

Z

Zimmer
Zuga



Улыбка длиною в жизнь