

HySil

А-силиконовая оттискная масса
Винилполисилоксановый оттискный материал повышенной гидрофильности для снятия более точных слепков




Слепочная масса HySil способна полностью заполнять межзубные пространства, что дает Вам возможность снимать еще более точные слепки.

Превосходная гидрофильность

HySil обладает повышенной вязкостью, текучестью и гидрофильностью, что позволяет делать более точные и детальные оттиски.


Гидрофильность слепочных материалов дает возможность делать слепки в среде повышенной влажности.

Тест на гидрофильность (по капле воды)

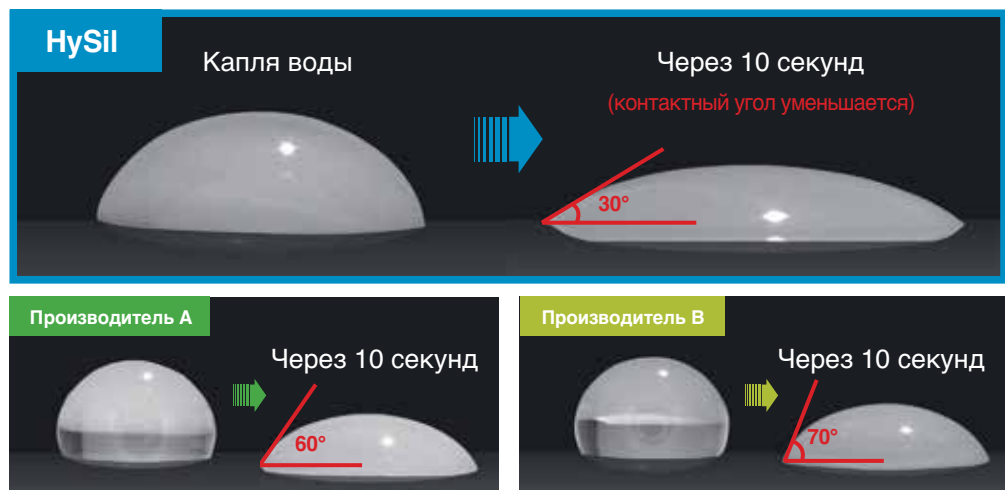

По результатам теста у гидрофильной оттискной массы HySil контактный угол оказался в 2 раза меньше, чем у других компаний-производителей.


Тест на гидрофильность (Изменение угла контакта с каплей воды)

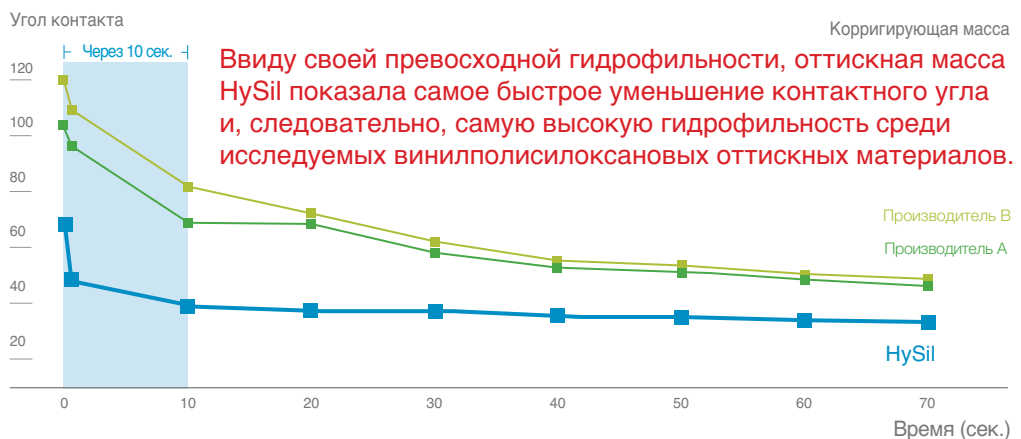

HySil застывает в ротовой полости быстро и без структурных изменений


Оптимальное рабочее время и быстрое застывание в ротовой полости

HySil обеспечивает достаточное время для работы с оттискным материалом. При внесении в ротовую полость пациента, оттискный материал быстро схватывается без изменения формы для более удобного и точного снятия слепка.

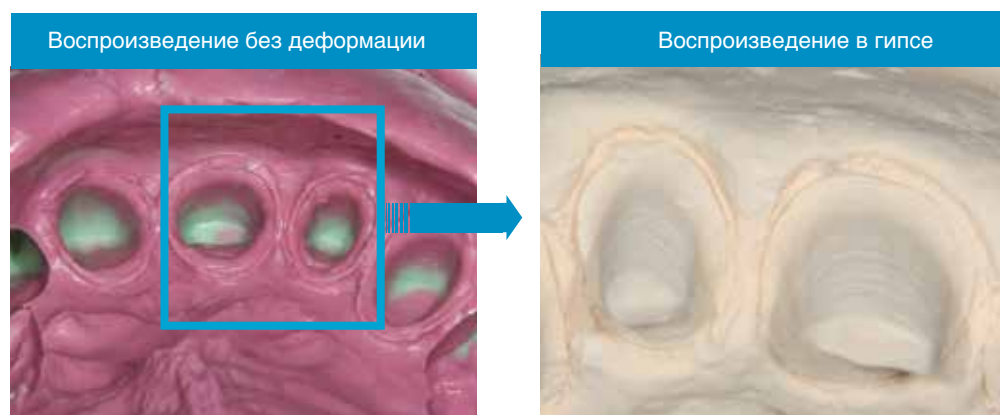

По результатам исследования показателей рабочего времени и времени затвердевания массы, HySil показывает высокое преимущество в сравнении с оттискными материалами других известных производителей.

Рабочее время / время до полного отвердевания материала

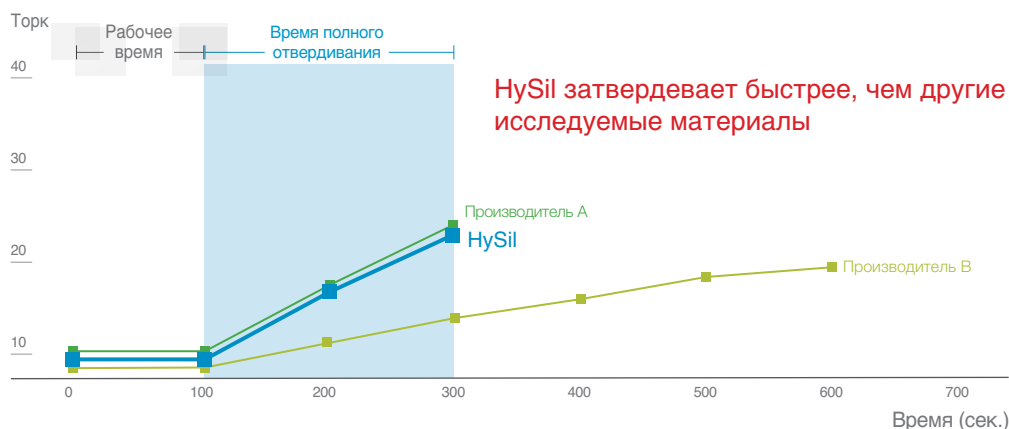


HySil можно использовать даже после длительного хранения

Стабильное
сохранение
свойств
материала

Оттисковая масса HySil производится из высококачественного немецкого сырья. При длительном сроке хранения, материал не изменяет свои основные свойства и цвет, что делает его более удобным в использовании по сравнению с оттисковыми массами других производителей.

Тест на срок хранения

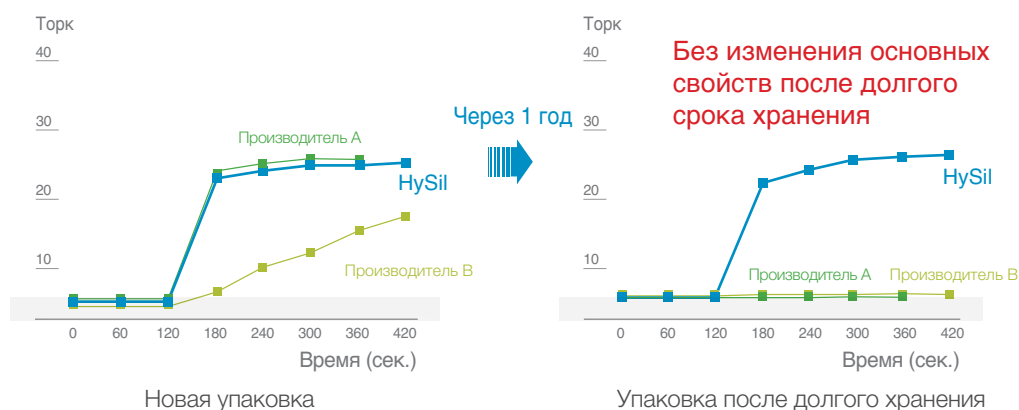

Тест показал, что оттисковые массы других производителей утратили основные свойства – отвердевание материала занимает больше времени. В HySil существенных изменений замечено не было.

Руководство
по применению

Как использовать HySil



С HySil слепки снимаются быстро, удобно и точно!

Удобство процедуры, снятие слепков превосходной точности ввиду повышенной гидрофильности, сокращенное время схватывания и стойкость к деформации: оттисковый материал Osstem HySil используется как для классических случаев реставрации зубного ряда, так и для реставрации на имплантатах.



Классическая реставрация

Вкладка



Одиночная коронка



Полнодуговой протез



Реставрация на имплантатах


Слепок с закрытой ложкой
(уровень имплантата)



Пластиковый колпачок
(уровень абатмента)



Прямое снятие слепка с абатмента

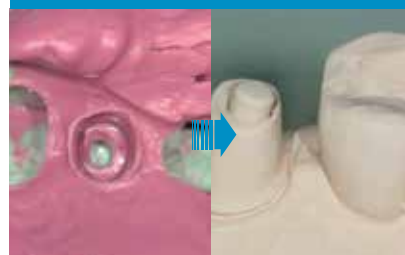

HySil

А-силиконовая оттискная масса

Линейка продукции

	Классификация	Упаковка	Код
	Корректирующая масса Extra Light	Коробка (4 картриджа)	ESS50EL
	Корректирующая масса Light	Коробка (4 картриджа) Коробка (15 картриджей)	ESS50L ESS50LB
	Слепочный материал средней вязкости	Коробка (4 картриджа) Коробка (15 картриджей)	ESS50M ESS50MB
	Слепочный материал высокой вязкости	Коробка (4 картриджа) Коробка (15 картриджей)	ESS50H ESS50HB
	База	База (Putty) - 400мл Катализатор - 400мл	ESS400P

Картридж - 50мл.