

Набор для удаления имплантата

EFR KIT


- Простое и быстрое удаление имплантата в 2 этапа
- Минимальная потеря прилегающей кости при удалении имплантата
- Процент успешных удалений – более 90%



1. Выбрать винт для удаления имплантата (См. инструкцию по выбору винта)



2. Зафиксировать винт для удаления имплантата по часовой стрелке с помощью ключа для фиксации винтов N/F (сила торка для платформы мини = 80Нсм, стандарт = 100Нсм)

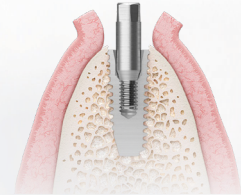


3. Прочно зафиксировав инструмент в имплантате, отсоединить ключ для фиксации Винта N/F



4. Соединить инструмент для удаления имплантата к винту N/F против часовой стрелки



5. Продолжить вращение против часовой стрелки с помощью динамометрического ключа (максимум 400Нсм)

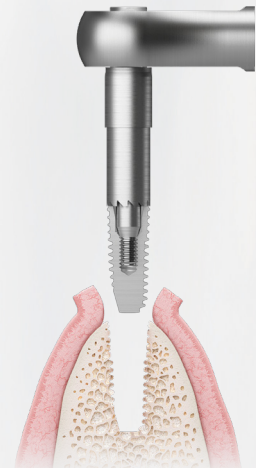

6. Прочная фиксация имплантата с инструментом для удаления имплантата дает возможность удалить имплантат с минимальной потерей прилегающей кости



Выбор Винта для удаления имплантата

Легкое повреждение	Выбрать Винт для удаления N	Сильное повреждение	Выбрать Винт для удаления F
<p>Без повреждений Трещина Скол в области платформы</p>	<p>N (Normal) Винт для удаления имплантата</p>	<p>Сильное повреждение внутреннего шестигранника (осталась только резьба внутри имплантата)</p>	<p>F (Fracture) Винт для удаления имплантата</p>

Набор для удаления винта

ESR KIT

- Простое решение для удаления сломанного винта в 2 этапа
- Процент успешных удалений сломанного винта = 90%

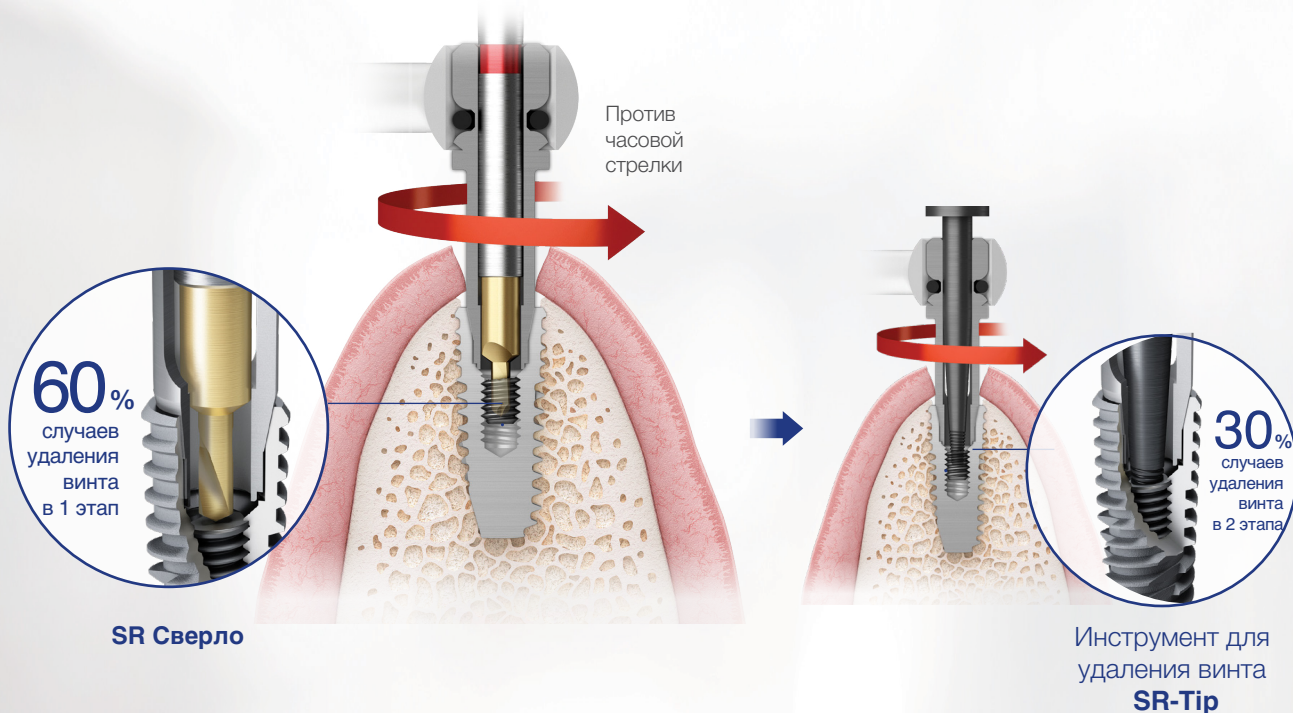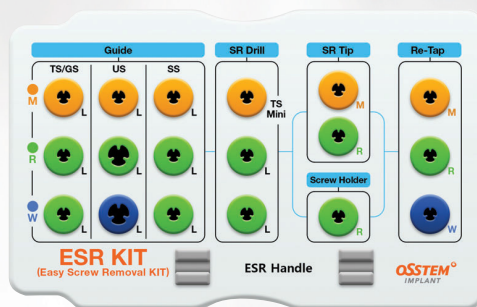

Варианты решения возможных проблем с протетикой

