




TS III SA Ø3.0 Имплантат

Прочное решение для узкого гребня

Имплантат TS III SA Ø3.0 создан специально для узкого гребня, при имплантации в эстетически важных зонах, например, для боковых резцов и фронтального отдела нижней челюсти.

TS III SA Ø3.0 совместим с широкой линейкой компонентов, что дает больше возможностей для эстетичных результатов реставрации.

OSSTEM[®]
IMPLANT

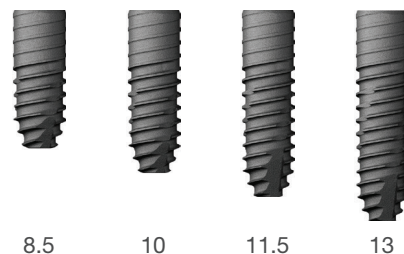


Прочное решение для узкого гребня

TSIII Ø3.0 Имплантат

Маленький диаметр, высокая прочность


Износостойкость

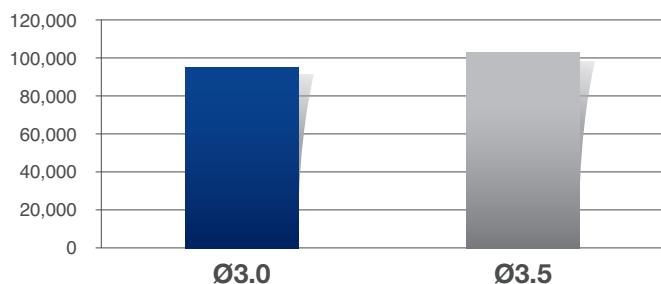

TS III Ø3.0 изготовлен из сплава титана высокого качества для усиления износостойкости и прочности конструкции. Износостойкость такая же, как у имплантата TS III Ø3.5


*Результаты испытания на износостойкость (применяемая нагрузка: 350Нсм)

100% совместим с абатментами TS III SA Ø3.5 Мини

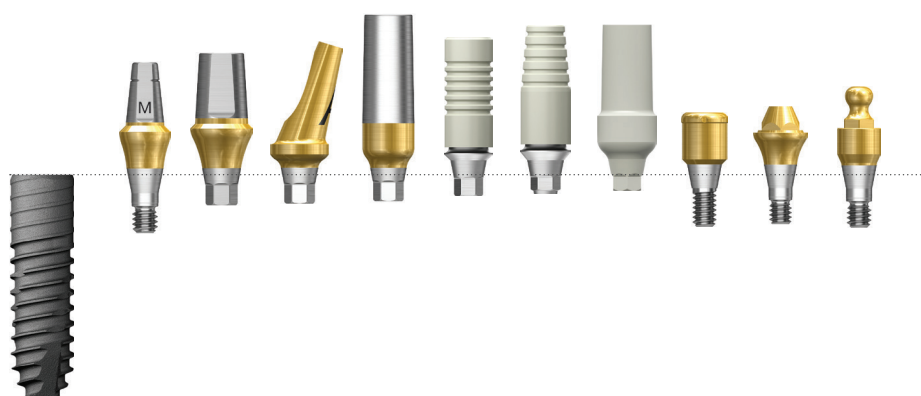

Хирургический протокол

Последовательность выбора сверел
122 Taper Kit

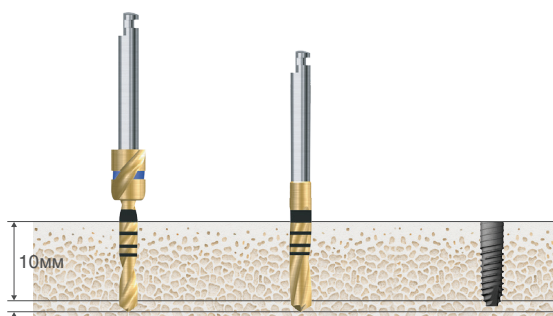

Плотность кости	Ø2.2 Сверло	Ø2.7 Сверло	Ø3.0
Мягкая	▶		
Средняя	▶	▶	
Плотная	▶	▶	Установка имплантата

Линейка

